


# Flowchart of Endodontics —システム化された根管治療製品群-

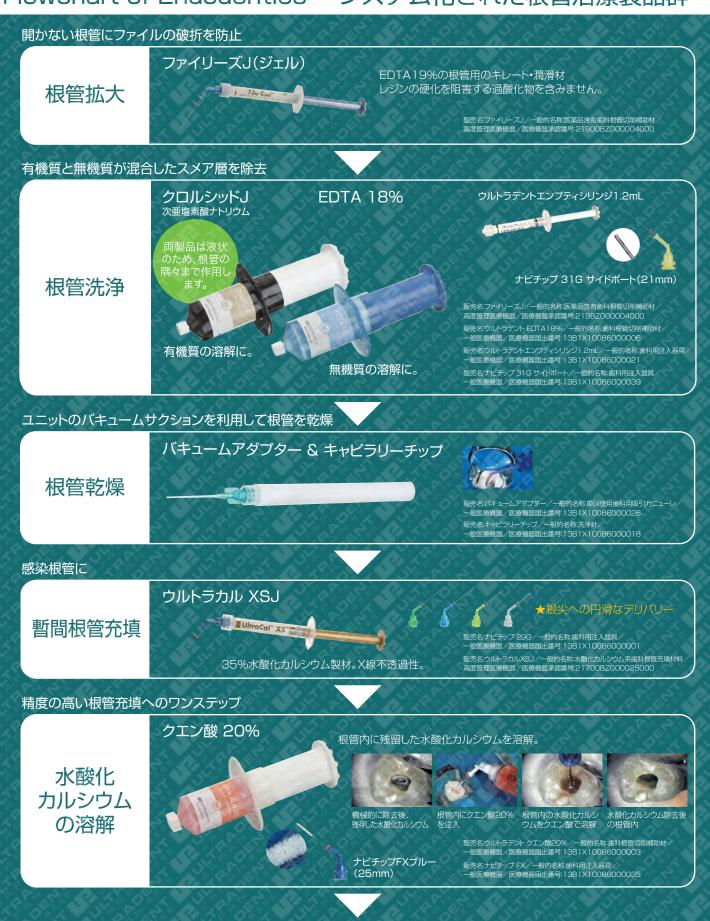

根管充填へ



# ナビチップ リファレンスガイド



## ナビチップとは

ナビチップの先端はしなやかに湾曲するため根管治療の際に、ニードルが根尖付近まで届き、材料を無駄なくデリバリーします。





ナビチップ 29G 外径: 0.35mm



ナビチップ 30G 外径: 0.30mm



ナビチップ FX(30G) 外径: 0.30mm



ナビチップ 31Gサイドポート 外径: 0.27mm

製品

推奨チップ

適応チップ

1 Note: 10	ファイリーズJ	30G	29G
	EDTA 18%	ナビチップFX	29G, 30G, 31G
	クロルシッドJ	31G	29G, 30G, ナビチップFX
BullinoCol' XS By	ウルトラカルXSJ	29G	
	クエン酸20%	ナビチップFX	29G, 30G, 31G

ファイル適応番号: 29G-35番、30G-30番、31G-25番ナビチップのカタログ番号はP.55を参照



# ファイリーズJ

根管拡大に最適



- EDTA 19%含有の根管用のキレート• 潤滑材
- ジェル状EDTA
- レジンの硬化を阻害する過酸化物を含まない

#### #1075-JP ファイリーズJ 4本キット ファイリーズJ(1.2mL) 4本 Pile-Eze-ナビチップ30G 17mm 5個 ナビチップ30G 21mm 5個 ナビチップ30G 25mm 5個 ナビチップ30G 27mm 5個 #1022-JP ファイリーズJ 2本キット ファイリーズJ(1.2mL) 2本 ナビチップ30G 17mm 2個 - I Film-ker ナビチップ30G 21mm 3個 ナビチップ30G 25mm 3個

#### #297-JP ファイリーズJ リフィル 4本

ファイリーズJ(1.2mL)

ナビチップ30G 27mm

4本

2個



販売名:ファイリーズ J/一般的名称: 医薬品含有歯科根管切削補助材/ 高度管理医療機器/医療機器承認番号: 21900BZG00004000

#### ナビチップ

	29G		30G	
	20個	50個	20個	50個
ホワイト(17mm)	#5112-JP	#1378-JP	#1249-JP	#1421-JP
イエロー(21mm)	#5113-JP	#1374-JP	#1349-JP	#1422-JP
ブルー(25mm)	#5114-JP	#1376-JP	#1250-JP	#1423-JP
グリーン(27mm)	#5115-JP	_	#1354-JP	_
バラエティパック (各5個)	#5116-JP	_	_	_

販売名:ナビチップ 29G / 一般的名称:歯科用注入器具/一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000001販売名:ナビチップ 30G / 一般的名称:歯科用注入器具/一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000017

## ウルトラデント EDTA 18%

根管洗浄材



- EDTA18%のスメア層除去材
- スメア層の溶解
- ナビチップFXとの併用による機械的な除去



図1:イリゲーションなしで拡大した 根管壁。スメア層に覆われている。

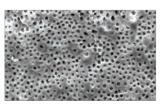


図3:次亜塩素酸ナトリウムとEDTA 溶液を併用した根管壁。象牙細管が 確認できる。

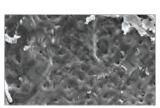


図2:次亜塩素酸ナトリウムを使用して拡大した根管壁。残存スメア層が確認できる。

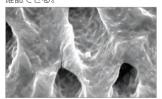


図4:図3の拡大図。



詰替用にエンプティシリンジ 1.2mLまたは5mLを用途に合せた チップでご使用ください。 P.59参照

#### #162-JP ウルトラデント EDTA18% リフィル(30mL)



販売名:ウルトラデント EDTA18%/一般的名称:歯科根管切削補助材/一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000006

#### ナビチップ31Gサイドポート(2穴タイプ)

	20個	50個	
イエロー(21mm)	#5121-JP	#5122-JP	
グリーン(27mm)	#5123-JP	#5124-JP	



販売名: ナビチップ 31G サイドポート/一般的名称: 歯科用注入器具/一般医療機器/医療機器届出番号: 13B1X10086000039

#### ナビチップFX(ブラシ付き)

丿 L ナッフFA(フランi)(さ)		
20個		
ホワイト(17mm)	#1452-JP	
ブルー(25mm)	#1454-JP	



販売名:ナビチップ FX /一般的名称:歯科用注入器具/一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000035



# クロルシッドJ

根管洗浄材



- ・ 次亜塩素酸ナトリウム3%の根管洗浄材
- スメア層の有機物分解・溶出
- 手を汚さずに必要量を取り分けられる利便性



#### #67-JP クロルシッドJ リフィル(30mL)



販売名:ファイリーズ J / 一般的名称:医薬品含有歯科根管切削補助材/ 高度管理医療機器/医療機器承認番号:21900BZG00004000

#### ナビチップ31Gサイドポート(2穴タイプ)

ノ L デック3 1 G リイトホート(2/(ツイフ)				
	20個	50個		
イエロー(21mm)	#5121-JP	#5122-JP		
グリーン(27mm)	#5123-JP	#5124-JP		

販売名:ナビチップ 31G サイドポート/一般的名称:歯科用注入器具/ 一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000039





販売名:イリゲーターチップ/一般的名称:歯科用注入器具/一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000037



# ナビチップ31Gサイドポート

先端側面に2つの穴のある根管洗浄用チップ

従来のオープンエンドイリゲーションチップと異なり、 先端側面にある2つの穴から材料をデリバリーでき、 安全かつ効果的な根管洗浄ができます。

安全性:チップ先端側面から材料をデリバリーでき、 根尖方向に到達しないため安全に洗浄

効果的:31ゲージという細い先端により、狭い根管の中でも的確なデリバリーが可能





# バキュームアダプター& キャピラリーチップ

単回使用歯科用吸引カニューレ



- バキュームアダプターにキャピラリーチップを装着することで効率的に根管乾燥が行え、大幅な時間短縮が可能
- チェアサイドのバキュームに適合
- バキュームアダプターの先端にはルアーロックタイプの様々なチップを装着できるため、幅広い臨床域で使用可能



バキュームアダプターとキャピラリーチップを使用 すれば、ペーパーポイントの使用量を低減できます。

#### #230-JP バキュームアダプター 10本

販売名:バキュームアダプター/一般的名称:単回使用歯科用吸引カニューレ/一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000026

#### キャピラリーチップ



販売名:キャピラリーチップ/一般的名称:洗浄針/ 一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000018

- \*ユニットメーカーにより別売(他社)の異径アダプターが必要となります。
- \*ユニットの新旧モデルにより適合しない場合がございます。詳しくは当社もしくは当社製品取扱販売店までご連絡ください。

## 種々のチップとの組み合わせ



SSTチップ 外科術野·オフィスホワイトニング等



オフィスホワイトニング材の吸引例



エンドイーズ 外科術野での吸引 その他の臨床使用可能



エンドイーズチップは複数のサイズがあります。左記各種サイズのエンドイーズ チップを選択しアダプターに装着して使用します。



マイクロキャピラリーチップ 歯肉溝・滲出液の吸引



ウルトラデントエンプティシリンジを使用 すれば吸引だけでなく注入も可能。

#### 根管の迅速な乾燥



1.ナビチップやイリゲーターチップ 等でEDTA溶液と次亜塩素酸 ナトリウム溶液を注入して根管内 を洗浄



2.バキュームアダプターにキャピラリーチップを取り付け、チップを根管深くに滑り込ませます。 チップを出し入れしながら吸引します。通常、溶液が根管から除去されます。



3.吸引後、必ずペーパーポイントを 根管に挿入して完全に乾燥させ ます。



## ウルトラカル XSJ

水酸化カルシウムペースト



- ナビチップ 29G を使用できる水酸化カルシウムペースト
- ・ 必要な部位へ塗布が可能
- 水酸化カルシウム 35% 含有
- X 線不透過

ウルトラカルXSJは、水溶性でpH12.5、X線不透過の水酸化カルシウムペーストです。

水酸化カルシウムはその高いpHにより抗菌作用が確認されており、 骨形成を促進させる効果があります。


#### #1027-JP ウルトラカルXSJ ナビチップキット

ウルトラカルXSJ (1.2mL)4本ナビチップ29G 17mm5個ナビチップ29G 21mm5個ナビチップ29G 25mm5個ナビチップ29G 27mm5個



販売名:ウルトラカル XSJ /一般的名称:水酸化カルシウム系歯科根管充填材料/高度管理医療機器/医療機器承認番号:21700BZG00025000

#### ウルトラカル XSJ を暫間根管充填した症例

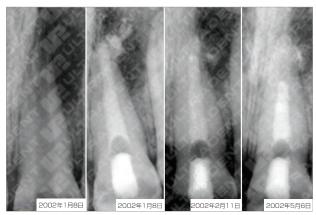

エンド/ペリオの症例 ウルトラカル XSJ を暫間根管充填した症例 透過像の経時的な改善が認められる。



#### #1024-JP ウルトラカルXSJ キット

ウルトラカルXSJ (1.2mL)2本ブラックミニチップ10個エンドイーズチップ 22G10個



#### #606-JP ウルトラカルXSJ リフィル 4本



販売名:ウルトラカル XSJ / 一般的名称:水酸化カルシウム系歯科根管充填材料/高度管理医療機器/医療機器承認番号:21700BZG00025000



#### ナビチップ29G

, 2, , , , 2				
	29G			
	20個	50個		
ホワイト(17mm)	#5112-JP	#1378-JP		
イエロー(21mm)	#5113-JP	#1374-JP		
ブルー(25mm)	#5114-JP	#1376-JP		
グリーン(27mm)	#5115-JP	_		
バラエティパック(各5個)	#5116-JP	_		

販売名:ナビチップ 29G / 一般的名称:歯科用注入器具/一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000001

エンドイーズチップ 22G #348-JP 20個

#1431-JP 100個



販売名:エンドイーズチップ/一般的名称:歯科用注入器具/一般医療機器/医療機器届出番号:1381×10086000011



# ウルトラデント クエン酸 20%

水酸化カルシウム溶解材



- ・ クエン酸20%の水酸化カルシウム溶解材
- 根管内に残留した水酸化カルシウムを溶解
- ナビチップFXを使用すれば機械的な除去も可能




#329-JP ウルトラデント クエン酸20% リフィル(30mL)




販売名:ウルトラデント クエン酸 20%/一般的名称:歯科根管切削補助材/一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X1008600003

#### ナビチップFX

20個		
ホワイト(17mm)	#1452-JP	
ブルー(25mm)	#1454-JP	

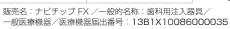


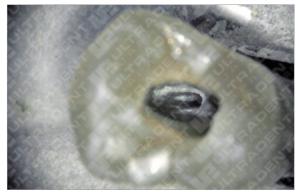

機械的に除去後、残存した水酸化カルシウム



根管内にクエン酸20%を注入

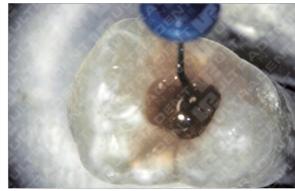

根管内の水酸化カルシウムをクエン酸で溶解



水酸化カルシウム除去後の根管内



# パーマフローパープル



- 紫色のフローアブルレジン
- 再根管治療の際の明示


#### 使用方法

根管充填終了後、髄床底にボンディング処置を行い、パーマフローパープルを充填し、光照射することで、再根管治療の際にパーフォレーションを防ぎ、 髄床底を明示することが可能です。また、根管口に敷くことで根管口明示 にも使用する事ができます。



①根管充填終了。患部をきれいに 清掃し、エアで乾燥させる。ユージ ノールのシーラーを使用している 場合には、完全にセットされるまで 待ち、表面をダイアモンドバーで 整えるなどしてからボンディング 処置を行うようにする。

(出典: Dr.Fred Barnett)

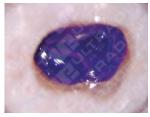

③1-1.5mmのパーマフローパープルを充填し、光照射(VALO プラズマモード3秒を2回、通常のLEDライトの場合20秒照射)

紫という色が髄床底にある事で、 他の医師へ患者を紹介する際など、 治療部位の明示にもなります。



②エッチングをし、PEAKLCを塗布、 光照射(VALOスタンダードモード10秒)



④オプション:根管口にパーマフローを使用する事で、根管口の明示にもなります。

象牙質に対するボンディングを先 に行う。

ユージノールを含むシーラーを使用する場合は、パーマフローパープルとボンディング材の接着を阻害する可能性があるため、親水性のレジンシーラーを使用する事をお勧めします。

#### #962-JP パーマフロー パープル

パーマフローパープル 1.2mLシリンジ(2.3g) (※チップは別売です)



販売名:パーマフロー/一般的名称:歯科充填用アクリル系レジン/ 管理医療機器/医療機器認証番号:225AKBZX00037000/冷蔵保存

#### #1168-JP マイクロチップ(20G) 20個

マイクロチップ(20G)

20個



販売名:マイクロチップ/一般的名称:歯科用注入器/ 一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000016







### 手順が簡単

シリンジデリバリーのパイオニアとして医療従事者が求められた<mark>スピード</mark>に対応するため、ウルトラデントのチップは、材料を正確な部位へ、そして適当な量を<mark>素早く、簡単に</mark>塗布していただけます。



接続し、



塗布し、



破棄

- VS -



1. 開けて、



2. 注いで、



3. 調合して、



4. 混ぜて、



5. 浸して、




6. 塗布し、



7. 浸して、



8. また塗布し、

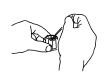

9. 浸して、



10. また塗布し、



11. 洗って、



12. 破棄

## <歯内療法関連製品に…>

## ナビチップ

• 根管への挿入が容易で、柔軟で先端に丸みのあるカニューレ



#### **LOK-TITE**™

	29G		30G	
	20個	50個	20個	50個
ホワイト(17mm)	#5112-JP	#1378-JP	#1249-JP	#1421-JP
イエロー(21mm)	#5113-JP	#1374-JP	#1349-JP	#1422-JP
ブルー(25mm)	#5114-JP	#1376-JP	#1250-JP	#1423-JP
グリーン(27mm)	#5115-JP	_	#1354-JP	_
バラエティパック (各5個)	#5116-JP	_	_	_

販売名:ナビチップ 29G /一般的名称:歯科用注入器具/ -般医療機器/医療機器届出番号:13B1X1008600001 販売名: ナビチップ 30G /一般的名称: 歯科用注入器具/ 一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000017

#### 使用推奨商品:

クロルシッドJ(30G) ウルトラカルXSJ(29G) EDTA クエン酸(30G)









## ナビチップ 31G サイドポート

• クローズタイプ2穴式根管洗浄用チップ



## **LOK-TITE**

	20個	50個
イエロー(21mm)	#5121-JP	#5122-JP
グリーン(27mm)	#5123-JP	#5124-JP

販売名: ナビチップ 31G サイドボート/一般的名称: 歯科用注入器具/一般医療機器/医療機器届出番号: 13B1X10086000039

使用推奨商品: クロルシッドJ

EDTA クエン酸









## ナビチップ FX

ブラシ付き根管洗浄チップ注水、こする、洗浄が同時に可能



#### **LOK-TITE**

#1452-JP 17mm 20個 #1454-JP 25mm 20個

販売名:ナビチップ FX /一般的名称:歯科用注入器具/ 一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000035

使用推奨商品: EDTA クエン酸



## エンドイーズチップ

・屈曲可能な万能チップ





先端を自在に曲がることが 注:31Gは曲げることができません。

	20個	100個	ゲージ
グリーン	#345-JP	_	18G
イエロー	#346-JP	_	19G
ピンク	#347-JP	_	20G
ブルー	#348-JP	#1431-JP	22G
オレンジ	#349-JP	_	31G

販売名:エンドイーズチップ/一般的名称:歯科用注入器具/ 一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000011

使用推奨商品: ウルトラカルXSJ(22G) バキュームアダプター








## <歯内療法関連製品に…>

## イリゲーターチップ

・先端が開いた独特の形態

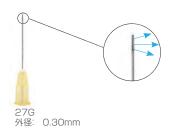

#207-JP 20個

販売名:イリゲーターチップ/一般的名称:歯科用注入器具/ 一般医療機器/医療機器届出番号: 13B1X10086000037

使用推奨商品:

EDTA

クロルシッドJ

クエン酸







## キャピラリーチップ

- ・ 屈曲可能・ バキュームアダプターを使用する根管内乾燥



#### **LOK-TITE**™

	20個	50個	内径(mm)
パープル(φ0.014")	#341-JP	#3099-JP	0.36
グリーン (φ0.019")	#186-JP	#1425-JP	0.48


販売名:キャピラリーチップ/一般的名称:洗浄針/ 一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000018

使用推奨商品:バキュームアダプター

## <ティッシュマネージメントに···>

## デントインフューザーチップ

先端に丸みのある、ブラシ付きメタルチップ

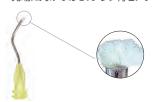

#### **LOK-TITE**™

#122-JP 20個 #125-JP 100個

販売名: デントインフューザーチップ/一般的名称: 歯科用注入器具/一般医療機器/医療機器届出番号: 13B1X10086000022

使用推奨商品: アストリンジェント ビスコスタット ビスコスタットクリア







## ブルーミニデントインフューザーチップ

• 軟らかい先端ブラシ付き



## **LOK-TITE™**

#128-JP 20個

販売名:ブルーミニデントインフューザーチップ/一般的名称:歯科用注入器具/一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000033

使用推奨商品: アストリンジェント ビスコスタット ビスコスタットクリア









## <多用途に…>

## インスパイラルブラシチップ

- ・ 先端に丸みのある、ブラシ付きメタルチップ・ 高粘性材料のフローに適しています。
- ・ 気泡の混入を防止



#### **LOK-TITE™**

#710-JP 20個 #123-JP 100個

販売名:インスパイラルブラシチップ/一般的名称:歯科用注入器具/ -般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000014

使用推奨商品: ウルトラエッチJ ウルトラシールXTプラスJ ピークLC



## ナノチップ

• 細部処置のための最小のデリバリーチップ



外径: 0.33mm

#1240-JP 20個 #1426-JP 100個

販売名:ナノチップ/一般的名称:歯科用注入器具/ -般医療機器/医療機器届出番号:13B1X1008600030

使用推奨商品:ウルトラエッチJ



#### マイクロチップ

フロアブルコンポジットレジン用の標準チップ



20G 外径: 0.96mm

## **LOK-TITE**

#1168-JP 20個

販売名:マイクロチップ/一般的名称:歯科用注入器具/ 一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000016

使用推奨商品:オパールダムOP パーマフロー パーマフローパープル



## ブラックマイクロチップ & ブルーマイクロチップ







	20個	100個
ブラックマイクロチップ	#194-JP	#1085-JP
ブルーマイクロチップ	#158JP	#127-JP

販売名:ブラックマイクロチップ/一般的名称:歯科用注入器具/ 一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000008 販売名:ブルーマイクロチップ/一般的名称:歯科用注入器具/ 一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X1008600009

#### 使用推奨商品:

(ブラック) ウルトラシールXTプラスJ ウルトラエッチJ プライマドライJ パーマフロー







## ブラックマイクロ FXチップ

羽毛付きチップ



#### **LOK-TITE**™

#1356-JP 20個

販売名:ブラックマイクロ FX チップ/一般的名称:歯科用注入器具/ 一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000034

使用推奨商品:プライマドライJ



# <u>"リバリー</u>

## <多用途に…>

## ブラックミニチップ

• 多量に塗布するときのための全プラスチック型光不透過チップ。



#### **LOK-TITE**™

#196-JP 20個 #514-JP 100個

販売名:ブラックミニチップ/一般的名称:歯科用注入器具/ -般医療機器/医療機器届出番号:13B1X1008600010

使用推奨商品:ウルトラブレンドプラスJ LCブロックアウトレジン



## ブラックミニブラシチップ

- 低粘度材料用気泡の混入を防止



#### **LOK-TITE**™

#190-JP 20個 #1169-JP 100個

販売名:ブラックミニブラシチップ/一般的名称:歯科用注入器具/ -般医療機器/医療機器届出番号: 13B1X10086000015

使用推奨商品: セーブルシーク シーク プライマドライJ ピークSE



## <その他>

## SSTチップ

• バキュームアダプターを使用し、外科手術、歯内療法などの多量吸引



## **LOK-TITE™**

#1248-JP 20個

販売名:SSTチップ/一般的名称:洗浄針/

一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000060

使用推奨商品:バキュームアダプター

## マイクロキャピラリーチップ

- 軟組織中でも見分けやすい明るい色
- 歯肉溝内清掃



5<sub>mm</sub> 0.41mm



10mm 外径 0.41mm

#### **LOK-TITE**™

#1120-JP 5<sub>mm</sub> 20個 #1802-JP 100個 5<sub>mm</sub> #1121-JP 10mm 20個

販売名:マイクロキャピラリーチップ/一般的名称:歯科用注入器具/一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000019

使用推奨商品:バキュームアダプター

## ホワイトマックチップ & ホワイトマックミニチップ





#661-JP 20個 ホワイトマックチップ #1247-JP 20個 ホワイトマックミニチップ

販売名:ホワイトマックチップ / 一般的名称:歯科用注入器具/ 級元石・バンイトマップテップ / 一版の3名が、1847日上八谷兵/一般医療機器/医療機器届出番号:1381X10086000032 販売名:ホワイトマックミニチップ / 一般的名称:歯科用注入器具/一般医療機器/医療機器届出番号:1381X10086000004

使用推奨商品: オラシールJ(マックチップ)





## くシリンジ>

## ウルトラデント エンプティシリンジ 1.2mL

• チップが外れ落ちないルアーロックタイプ



#124-JP 20本

販売名:ウルトラデント エンプティシリンジ 1.2mL /一般的名称:歯科用注入器具/ 一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000021

#### ウルトラデント エンプティシリンジ 5<sub>m</sub>L

• チップが外れ落ちないルアーロックタイプ



#201-JP 10本

販売名:ウルトラデント エンプティシリンジ 5mL /一般的名称:歯科用注入器具/ 一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000043

## ビスコスタット エンプティシリンジ 1.2mL

- 弱遮光性 ビスコスタットの詰替用
- チップが外れ落ちないルアーロックタイプ



#1278-JP 20本

ビスコスタット(医療機器届出番号:13B1X10086000027)および アストリンジェント(医療機器届出番号:13B1X10086000028)の構成品

## スキニシリンジ 0.5mL

- ・ 遮光性で少量の材料を使い切る特殊構造・ チップが外れ落ちないルアーロックタイプ・ 光重合材料のデリバリー用

#1680-JP 20本 #1681-JP 50本

販売名:スキニシリンジ 0.5mL /一般的名称:歯科用注入器具/一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X10086000012



## シリンジカバー

• 交叉感染を予防するためのシリンジカバー



#249-JP 250枚

使用推奨商品:すべての1.2mLシリンジ

## ルアーロックキャップ

- ウイング付きルアーロックキャップ
- 1.2mL, 5mLシリンジ用キャップ



#204-JP ブラック(光不透過) 20個 #205-JP ホワイト 20個




# <その他>

# シリンジオーガナイザー クリア

- シリンジ30本収容可能引き出しトレー付き射出成型のポリカーボネート製

#379-JP 1個

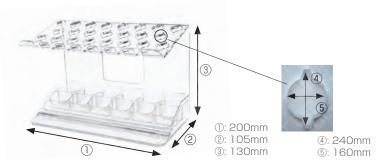

# こまかい器材をトレーに収納









bringing POWER to light



VALOの詳細はP.40をご覧ください。

# ホワイトニングポスター、院内掲示物はすべて無料です!

#### オパールエッセンス10% 院内掲示物

#### ●ポスター(40.5x50.5cm)



#68215(Lisa)

#98883(Debra)

#98884(Brittney)

#98885(Duy)



#98898(Skyler)

#98897(Couple)

●ポスター(30x30cm)



#1(Nobuko)

#2(Megumi)

#### ●窓貼ステッカー(30x30cm)



●患者リーフレット(30枚入り)

- ●患者ミニリーフレット(20枚入)
- ●リーフレット用カウンタースタンド





## ウルトラシール 院内掲示物




親子バージョン



マンガバージョン

## 院内掲示物のご要望は、各取扱店にお尋ねください。

\*院内掲示物のデザイン等はお客様への予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

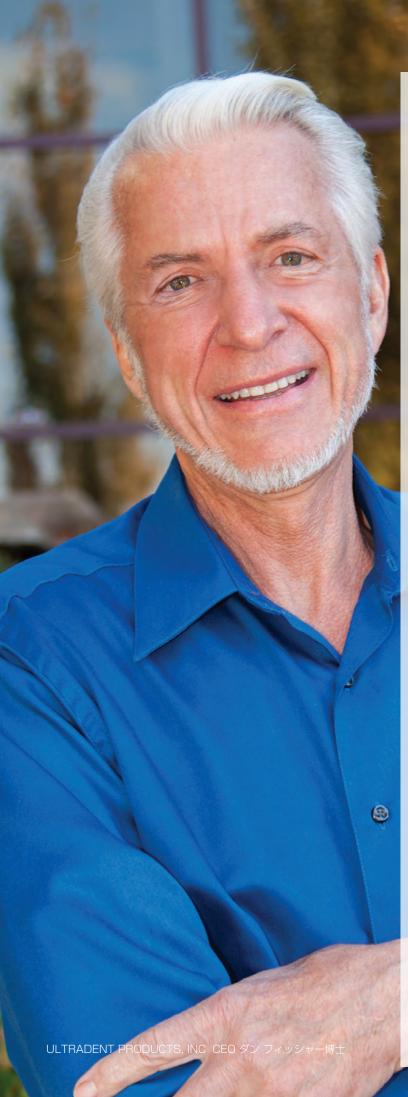

# ULTRADENT PRODUCTS, INCの 企業ポリシー

#### 信念

弊社では、プロフェッショナルな最新技術の治療を患者へ施すために歯科医療従事者が使用する歯科材料を提供しています。そのために、新製品の開発、現在販売している製品の技術強化を図っています。高品質な製品とサービスを提供し、お客様のニーズに応えるために、ご意見、ご質問をお寄せください。

#### 梱包

弊社では環境問題の解決にも取り組んでいますが、製品の輸送に 関しては、安全にお届けするために配慮しております。

米国本社ではISO9001とヨーロッパにおけるCEマークを取得済みです。

すべての製品はラテックスフリーです。



#### ISO13485取得

外国製造業者である米国本社はISO13485 規格に適合しており、改正薬事法の品質保証 基準にも適合しています。



#### CEマーク取得

当社では、欧州安全認定マークであるCEマークを 取得しています。



J025 = 製造本体のロット番号

J<u>02</u>5 = 有効期限月:2月

J025 = 有効期限年:2015年

すべてのウルトラデント製シリンジには有効期限が印字されています。 アルファベットで記載されているのが、製品管理のためのロット番号で、3つの数字は有効期限年月です。最初の2数字が有効期限月で、3番目の数字が有効期限年です。

製品の有効期限は製造年月日を基準に設定しております。

\*本書の内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

1本書に記載のREALITYについてはwww.realityesthetics.comをご覧ください。





本

http://www.ultradentjapan.com

facebook.com/ultradentjapan

社 〒 151-0071 東京都渋谷区本町 1-7-5 初台村上ビル 4F TEL: 03-5365-1760 FAX: 03-5365-1759

0120-060-751

第一種医療機器製造販売業 許可番号:13B1X10086

大阪営業所 〒 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 2 丁目 14-4 MF 新大阪ビル 4F

ウェアハウス 〒 140-0012 東京都品川区勝島 1-5-21 東神倉庫 20 号館 3F カスタマーサービス TEL: 03-5767-6405 FAX: 03-5767-6406 医療機器製造業 許可番号: 13BZ200426

TEL: 06-6151-3251 FAX: 06-6151-3252